

Deutsche
AidsHilfe

ICH WEISS WAS ICH TU

€ 0197

Rev. 2020-01

AMOR
Gummiwaren GmbH,
August-Rosk-St. 4,
99310 Arnstadt, Germany

2024-11

MD

1 natürliches Marken kondom „AMOR STRONG“ aus Naturkautschuklatex mit Reservoir, glatt, zylindrisch, 53 mm breit, mit Gleitmittel, extra starke Wanddicke, elektronisch geprüft.

LOT 11088-4 ISO 4074

1 Sachet Gleitgel „AMOR Gleitmittel BASIC“, wasserbasierend, 3 ml LOT AZ14501

Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befuchtung im Intimbereich bei Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

Latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleitmittel nur solche verwenden, die als kondomgeeignet ausgewiesen sind. Keine fetthaltigen Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, Massageöl, Butter, Margarine usw. verwenden, da diese das Kondom schädigen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die in Kontakt mit dem Kondom kommen können, ist ein Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit mit Kondomen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten, oder sollten Unverträglichkeiten auftreten.

Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Chargennummer hinter dem Chargensymbol und das Verfallsdatum hinter dem Symbol „verwendbar bis“ auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte und dienen dazu, bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungsmittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionen.

Gebrauchsanweisung

Die Kondomeinzelpackung (Folienbriefchen) auf Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich beschädigt oder offen, das Kondom verworfen und ein neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf den erigierten Penis setzen, und über den gesamten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Weise herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll entsorgen und nicht in die Toilette werfen. Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk-

LOT Chargencode

verwendbar bis

MD Medical Device

Hersteller

Gebrauchsanweisung beachten

bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

trocken aufbewahren

von Sonnenlicht fernhalten


enthält Naturkautschuklatex

nicht wiederverwenden

IMWIT.DE

ICH
WEISS
WAS ICH
TU!

MEINE WAHL. DEIN RESPEKT.
SAFER SEX 3.0

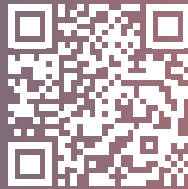

DEIN SCHUTZ VOR HIV



DIE **PREP**

DEIN **KONDOM**



◀ ES GIBT NOCH MEHR SAFER SEX! ▶



SCHUTZ DURCH
THERAPIE

WAS SCHIEF GEGANGEN?

DANN MACH
SCHNELL 'NE **PEP!**