

LOT Chargencode

Verwendbar bis

MD Medical Device



Gebrauchsanweisung beachten



bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



trocken aufbewahren



von Sonnenlicht fernhalten



enthält Naturkautschuklatex



nicht wiederverwenden

iwwit.de

Ich spars wünscht:
ICH WEISS
WAS ICH TU



GENIESST
DU
EUCH!

Deutsche
Aidshilfe

ICH WEISS
WAS ICH TU

1 naturfarbendes MarkenkonDOM „AMOR NATURE“ aus
Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir,
mit Gleitmittel, elektronisch geprüft.

LOT A22030 ISO 4074



1 Sachtel Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“,
wasserbasierend, 4 ml LOT A222501

Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

AMOR

Gummiwaren GmbH,
August-Rost-Str. 4,
99310 Arnstadt, Germany

2025-06



CE 0197

Rev. 2021/01

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorruhen kann. Als zusätzliche Gleitmittel nur solche verwenden, die als kondomgeeignet ausgewiesen sind. Keine fetthaltigen, Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperöle, Cremes, Butter, Margarine usw. verwenden. Diese Art der Anwendung von Medikamenten, die in Kombination mit dem Kondom kommen, ist in Kombination zu betragen. Medizinische Hilfe ist möglich. Schmelz, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs nicht verwendet werden oder bersten, oder sollte nicht verwendet werden. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte und dienen dazu, bei der Vermeidung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaften zu wirken. Keine Art von Verfüugungsmittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionen.

Gebrauchsanweisung Die Kondomverpackung (Folienbrüchigen) auf Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners einlegen. Dazu das Kondom mit dem Finger vorsichtig aus der Folie befreien, um Beschädigungen durch Fingerringel, Schmutz usw. zu vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Luft man und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf den erigierten Penis setzen, und über den gesamten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, dass das Kondom abrisst oder übermäßig auf dem Penis spant, denn dies kann zu einem Riss im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den Penis bild nach der Ejakulation, jedoch spätestens, bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Weise herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes Risiko für ein Reißen des Kondoms oder für eine Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll entsorgen und nicht in die Toilette werfen. Diese Kondome bestehen aus Latexkautschuk-

Was schießst du ab?
Dann mach **PEPI** schnell, ne?

die **PrEP**



Es gibt noch mehr Safer Sex!



Dein **Kondom**



Dein Schutz vor HIV



MEINE WAHL. DEIN RESPEKT.
SAFER SEX 3.0

Schutz durch **Therapie**



LOT Chargencode

verwendbar bis

MD Medical Device

Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



trocken aufbewahren



von Sonnenlicht fernhalten



enthält Naturkautschuklatex



nicht wiederverwenden

iwwit.de

Gebrauchsanweisung (Folienabrücken) auf Umversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich beschädigt oder offen, das Kondom werfen und ein neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit dem Finger vorsichtig aus der Folie befreien, um Beschädigungen durch Fingerringel, Schmutz usw. zu vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Deman und Zügelfinger zusammendrücken, sodass es keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten, oder sollte Schmerzen, Juckreiz, Rötungen oder andere Symptome auftreten, sollte das Kondom sofort entfernt werden. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr zur Anwendung verwendet werden. Nach Ablauf der Verfallsdauer sind die Kondome nicht mehr zu verwenden. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren.

WAS ICH WEISS

Viel Spaß wünscht.

GÖNNT EUCHI!

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorruft kann. Als zusätzliche Gleitmittel nur solche verwenden, die als kondomgeeignet ausgewiesen sind. Keine fetthaltigen Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperöle oder Cremes, Butter, Margarine usw. verwenden. Diese sind mit dem Kondom inkompatibel und können zu einer Beschädigung des Kondoms führen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die in Kombination mit dem Kondom kommen können, ist ein Arzt oder Apotheker zu deren Verfügbarkeit mit dem Hersteller zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten, oder sollte Schmerzen, Juckreiz, Rötungen oder andere Symptome auftreten. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr zur Anwendung verwendet werden. Nach Ablauf der Verfallsdauer sind die Kondome nicht mehr zu verwenden. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren. Bitte die Originalpackung sorgfältig aufbewahren.

Deutsche Aidshilfe



1 naturfarbendes Marken kondom „AMOR NATURE“ aus Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, mit Gleitmittel, elektronisch geprüft.

LOT A22030 ISO 4074



1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“, wasserbasierend, 4 ml LOT A225501

Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

AMOR Gummiwaren GmbH, August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Germany

2025-06



CE 0197

Rev. 2021/01

Was schießst du ab?
Dann mach **PEPI** schnell, ne!

die **PrEP**



◀ Es gibt noch mehr Safer Sex! ▶



Dein **Kondom**

Dein Schutz vor HIV



MEINE WAHL. DEIN RESPEKT.
SAFER SEX 3.0

Schutz durch
Therapie



LOT Chargencode



verwendbar bei



MD Medical Device



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



trocken aufbewahren



von Sonnenlicht fernhalten



nicht wiederverwenden



enthält Naturkautschuklatex

iwwit.de**Gebrauchsanweisung**

Die Kondomverpackung (Folienbrüche) auf Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich beschädigt oder offen, das Kondom verworfen und ein neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit dem Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Demo-Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf den engierten Penis setzen, und über den gesamten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, dass das Kondom abrutscht oder übermäßig auf dem Penis spannt. Dazu den Penis zurückziehen. Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Weise herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine Infektion geben. Gebrochene Kondome im Hausmüll entsorgen und nicht in die Toilette werfen.

Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk-

Deutsche Aidshilfe



1 naturfarbendes MarkenkonDOM „AMOR NATURE“ aus Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, mit Gleitmittel, elektronisch geprüft.

LOT A22030

ISO 4074



1 Sacht Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“, wasserbasierend, 4 ml **LOT** A22501

Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

AMOR

Gummiwaren GmbH,
August-Rost-Str. 4,
99310 Arnstadt, Germany



2025-06

**CE 0197**

Rev. 2020/01

lax, der bei Latexallergikern eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleitmittel nur solche verwenden, die als kondomgeeignet ausgewiesen sind. Keine fetthaltigen Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperöle oder Cremes, Butter, Margarine usw. verwenden. Bei Anwendung von Medikamenten, die in Kombination mit dem Kondom kommen können, ist ein Arzt oder Apotheker zu deren Verfügbarkeit mit Kondomen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichstenfalls zu suchen, sollte ein Kondom während der Benutzung schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden nach dem Kondombruch, in die Charakteristika der Kondome zurückzuführen, sind das Verfallsdatum hinter dem Symbol, verwenden. Die auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte, unterstehend zu wirken. Keine Art von Verfallsdatum garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaften und von Schwangerschaften. Keine Art von Verfallsdatum garantiert einen 100%igen Schutz vor Verfallsdatum.

Was schießst du ab?
Dann mach **PEPI** schnell, ne!

die **PrEP**



Dein **Kondom**




Es gibt noch mehr Safer Sex!



Schutz durch **Therapie**



Dein Schutz vor HIV

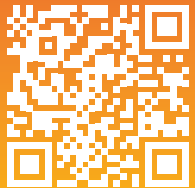

MEINE WAHL. DEIN RESPEKT.
SAFER SEX 3.0

LOT Chargencode



verwendbar bis



Medical Device



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



trocken aufbewahren



von Sonnenlicht fernhalten



enthält Naturkautschuklatex



nicht wiederverwenden

iwwit.de

NACH WEISS WAS ICH TU

Viel Spaß wünscht.

LIEBT EUCH!

NACH WEISS WAS ICH TU

Deutsche Aidshilfe

1 naturfarbendes Markenkondom 'AMOR NATURE' aus Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, mit Gleitmittel, elektronisch geprüft.

LOT A22030 ISO 4074



1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“, wasserbasierend, 4 ml LOT A22501

Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

AMOR Gummiwaren GmbH, August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Germany

2025-06



CE 0197

Rev. 2021/01

latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperöle, Glycerin, Butter, Margarine usw. verwenden. Diese Art von Kondom kann Komplikationen bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die in Kombination mit dem Kondom kommen, ist ein Arzt oder Apotheker zu deren Verfügbarkeit mit Kondomen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglich, wenn sie zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten, oder sollte den Urverfäglichkeiten auflösen. Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Originalverpackung hinter dem Symbol verwenden, das Verfallsdatum hinter dem Verfallsdatum, jedoch spätestens, bis auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte und dienen dazu, bei der Vermeidung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaften unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungsmittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionen.

Gebrauchsanweisung auf Die Kondomverpackung (Folienbrüchigen) verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit dem Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Druck und Zeigefinger zusammenzudrücken, sodass es keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf den engierten Penis setzen, und über den gesamten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, dass das Kondom abdrückt oder übermäßig auf dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens, so herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll entsorgen und nicht in die Toilette werfen. Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuk-

Was schiefer gegangen?
Dann mach **PEPI**
schnell, ne

die **PrEP**




Es gibt noch mehr Safer Sex!



Dein **Kondom**



Dein Schutz vor HIV

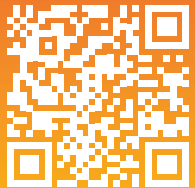

MEINE WAHL. DEIN RESPEKT.
SAFER SEX 3.0

Schutz durch
Therapie



LOT Chargencode

verwendbar bis

MD Medical Device

Hersteller

Gebruiksaanwijzing beachten bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

trocken aufbewahren

von Sonnenlicht fernhalten

enthält Naturkautschuklatex

nicht wiederverwenden

iwwit.de

NACH WEISS WAS ICH TU

Viel Spaß wünscht.

Jetzt & hier

Bei mir
Bei dir
Bei mir

FICKEN?

Deutsche Aidshilfe

NACH WEISS WAS ICH TU

1 naturfarbendes Marken kondom „AMOR NATURE“ aus Naturkautschuklatex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch, mit Reservoir, mit Gleitmittel, elektronisch geprüft.

LOT A22030 ISO 4074

1 Sachet Gleitgel „Vibratissimo Play Gel med“, wasserbasierend, 4 ml LOT A22501

Das Gleitmittel dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird.

AMOR Gummiwaren GmbH, August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Germany

2025-06



CE 0197

Rev. 2020/01

Die Kondome bestehen aus Latexkautschuk-
erzeugen und mit in die Folie zu werfen.
Inkubation geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll
risiko für ein Verlegen des Kondoms oder für eine
dem. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes
zu herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden
des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr
die auf der Verpackung beschriftet. Nach Ablauf
das Verfallsdatum hinter dem Symbol verwenden.
geheimer hinter dem Chargencodenummern und
Sommerhitze geschützt aufbewahren. Bitte die Char-
den Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor
Umwertmöglichkeiten aufbewahren.
den Urnachprüfungen aufbewahren.
den zu suchen, sollte ein Kondom während des Ge-
schmitt, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stun-
dornen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst
Arzt oder Apotheker zu deren Verfügbarkeit mit Kon-
takt mit dem Kondom kommen, ist in Kon-
ge Anwendung von Medikamenten, die in Kon-
Misserfolg, Blätter, Margarine usw. verwenden,
Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotions,
geeignet ausgewaschen sind, keine fetthaltigen
mittel nur solche verwenden, die als kondom-
Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen
Schocks hervorruhen kann. Als zusätzliche Gleit-
latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische

geschützt oder Infektionen.
mittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft
unterstützend zu wirken. Keine Art von Verfüngung
Übertragen Infektionen und von Schwangerschaft
und dienen dazu, bei der Vermeidung von sexuell
Verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte
des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr
die auf der Verpackung beschriftet. Nach Ablauf
das Verfallsdatum hinter dem Symbol verwenden.
geheimer hinter dem Chargencodenummern und
Sommerhitze geschützt aufbewahren. Bitte die Char-
den Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor
Umwertmöglichkeiten aufbewahren.
den Urnachprüfungen aufbewahren.
den zu suchen, sollte ein Kondom während des Ge-
schmitt, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stun-
dornen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst
Arzt oder Apotheker zu deren Verfügbarkeit mit Kon-
takt mit dem Kondom kommen, ist in Kon-
ge Anwendung von Medikamenten, die in Kon-
Misserfolg, Blätter, Margarine usw. verwenden,
Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotions,
geeignet ausgewaschen sind, keine fetthaltigen
mittel nur solche verwenden, die als kondom-
Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen
Schocks hervorruhen kann. Als zusätzliche Gleit-
latex, der bei Latexallergikern eventuell allergische

Gebruiksaanwijzing (Folienbrieven) auf
Die Kondomeinpackung
Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper
verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten
neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung
schädigt oder offen, das Kondom werfen und ein
Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich be-
Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Be-
schädigungen durch Fingerringel, Schmutz usw. zu
vermeiden. Das Reservoir (Kondomspitze) mit Dau-
men und Zeigefinger zusammenendrücken, sodass es
keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückzie-
hen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf
den engeren Penis setzen, und über den gesam-
ten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine
Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt,
dass das Kondom abdrückt oder übermäßig auf
dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss
im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen.
Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den
Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens
vor er zu erschießen beginnt, auf die gleiche Weis-
herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden
dem. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes
risiko für ein Verlegen des Kondoms oder für eine
Inkubation geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll
erzeugen und mit in die Folie zu werfen.
Die Kondome bestehen aus Latexkautschuk-

Was schiefer gegangen?
Dann mach **PEPI** schnell, ne

die **PREP**



Es gibt noch mehr Safer Sex!



Dein **Kondom**

Dein Schutz vor HIV



MEINE WAHL. DEIN RESPEKT.
SAFER SEX 3.0

Schutz durch **Therapie**

